

ScopeValve

Piston de nettoyage pour canal air/eau

Adaptateur de nettoyage pour canal d'aspiration

**Pour le pré-traitement
des endoscopes
immédiatement après la
procédure endoscopique**

**Piston de nettoyage pour
canal air/eau**

Pour éliminer les contaminants
présents dans le canal air/eau

**Adaptateur de nettoyage
pour canal d'aspiration**

Pour éliminer les contaminants
présents dans le canal
d'aspiration via l'entrée du
canal opérateur



CREO
MEDICAL

ScopeValve

Piston & adaptateur de nettoyage pour canal air/eau et pour canal d'aspiration


Il est fortement recommandé de procéder, en salle d'examen, au pré-traitement de l'endoscope immédiatement après chaque procédure, car l'élimination des substances organiques présentes après l'examen est essentielle afin de garantir l'efficacité des étapes ultérieures de nettoyage et donc le résultat final de la désinfection.

Les pistons de nettoyage **ScopeValve** sont utilisés pour rincer le canal air/eau de l'endoscope directement après l'examen, empêchant ainsi la formation de biofilm et réduisant au maximum le risque de contamination croisée.

L'adaptateur de nettoyage pour canal d'aspiration est utilisé pour aspirer les solutions détergentes via l'entrée du canal opérateur de l'endoscope, afin d'en éliminer les contaminants.

À usage unique, ces dispositifs :

- ▶ Sont prêts à l'emploi,
- ▶ Éliminent le nettoyage manuel et le retraitement des pistons et adaptateur réutilisables,
- ▶ Réduisent la charge de travail du personnel responsable du nettoyage des endoscopes,
- ▶ Améliorent la sécurité du patient face aux risques potentiels de contaminations.

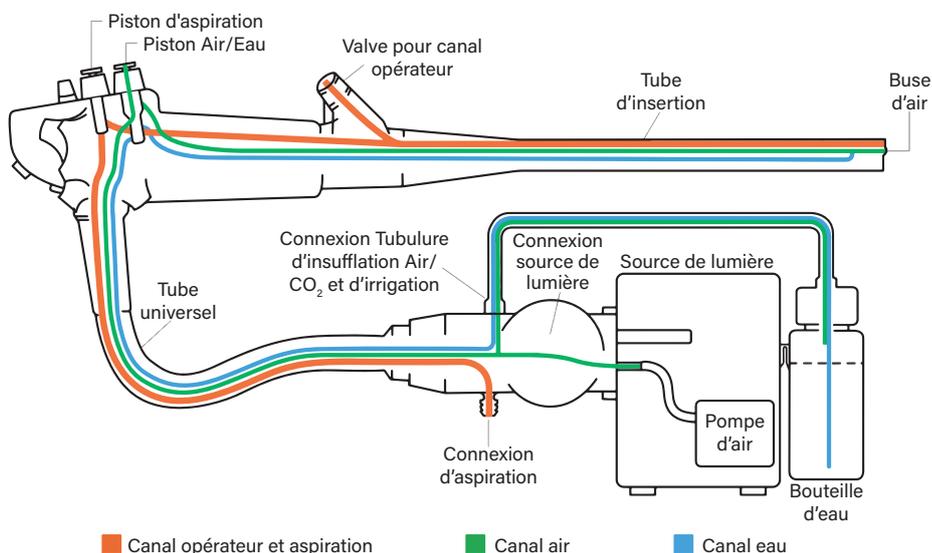

Pistons et adaptateur de nettoyage, à usage unique



ENDO038



ENDO105



ENDO075



ENDO3875

Référence

Désignation

CDT

ENDO038	Piston de nettoyage pour canal air/eau pour endoscopes digestifs Olympus®, non stérile	100
ENDO105	Piston de nettoyage pour canal air/eau pour endoscopes digestifs Fujifilm® série 700, non stérile	100
ENDO075	Adaptateur de nettoyage pour canal d'aspiration pour endoscopes digestifs Olympus® et Fujifilm®, non stérile	50
ENDO3875	Adaptateur de nettoyage pour canal d'aspiration + piston de nettoyage pour canal air/eau pour endoscopes digestifs Olympus®, non stérile	25

Caractéristiques



▶ **Usage unique** pour un produit toujours efficace et une diminution significative des risques d'infections nosocomiales.



▶ **Traçabilité** : 3 étiquettes détachables autocollantes accompagnent chaque dispositif.

Dénomination : Pistons et adaptateur de nettoyage, ScopeValve. **Indications** : Pour rincer les canaux air/eau et aspiration des endoscopes. **Classe** : I non stérile **Organisme notifié** : Certificat de conformité CE. **Fabricant** : GA Health Company Limited. **Bon usage** : Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement** : Produit non inscrit à la LPPR. **Version** : SVA_F_2. Rev.02. Date 26-03-24

Distribué en France par :

Creo Medical SASU

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

